


نحوه استفاده از الکتروکوتر Force 2

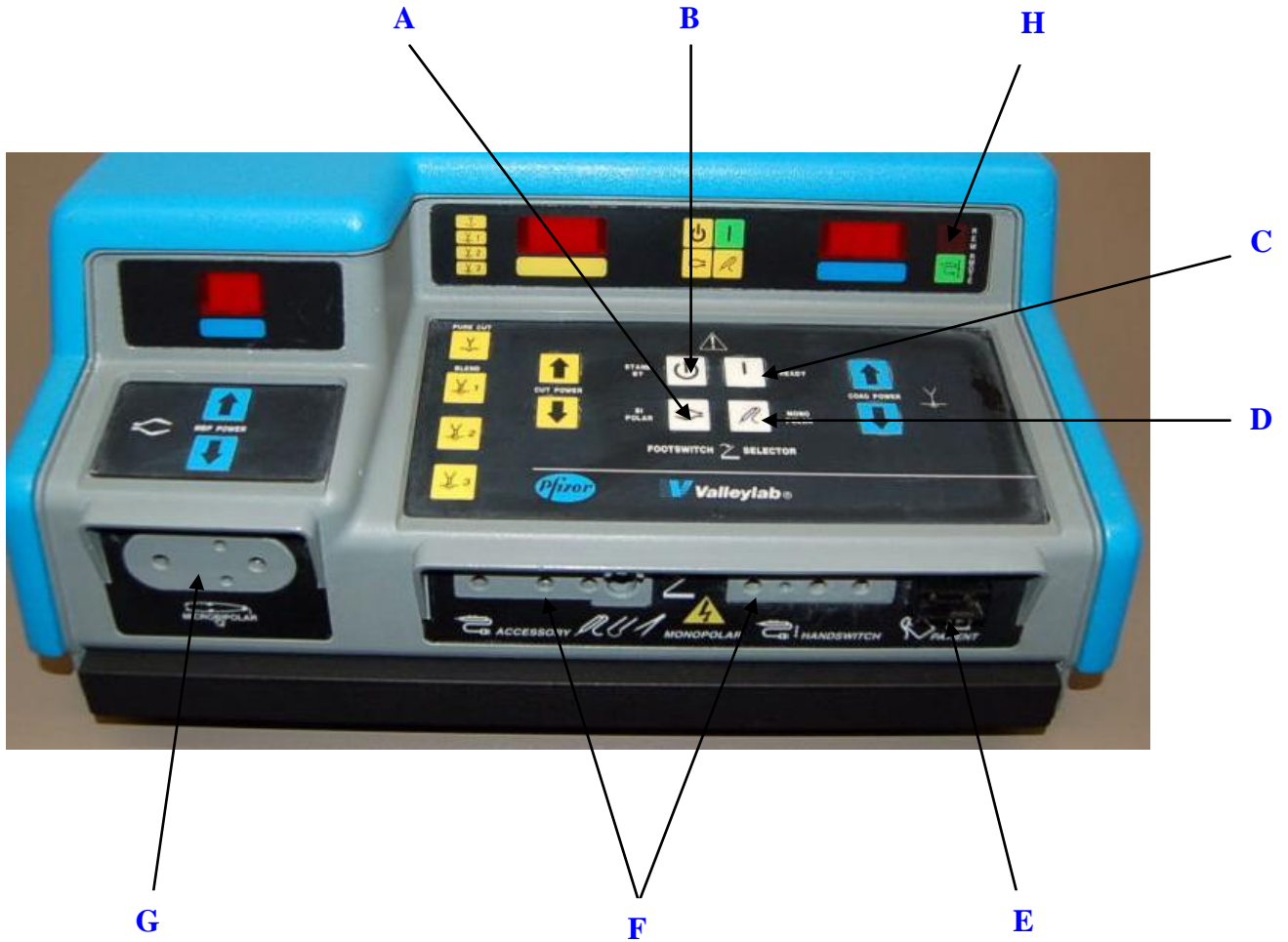

- ۱- ابتدا بوسیله دکمه خاموش/روشن در پشت ، دستگاه را روشن نمایید.
- ۲- جهت استفاده از دستگاه دکمه **C** را فشار دهید تا دستگاه در حالت **READY** قرار بگیرد.
- ۳- سپس پلیت را به بیمار وصل نموده و سیم رابط آن را به قسمت **E** وارد کنید.
- ۴- پس از اتصال صحیح پلیت و سالم بودن سیم رابط بایستی چراغ آلام **H** خاموش گردد.
- ۵- قلم مونوپلار را به کانکتورهای قسمت **F** متصل نمایید.
- ۶- برای استفاده از مونوپلار بصورت پدالی بایستی پدال مونوپلار را به کانکتور پدال مونوپلار در پشت دستگاه وصل نمایید و سپس دکمه **D** را فشار دهید.
- ۷- برای استفاده از بایپلار بایستی پدال مونوپلار را به کانکتور مونوپلار در پشت دستگاه وصل نموده و دکمه **A** را فشار دهید. سپس سیم رابط بایپلار را به کانکتور **G** وصل نمایید.