


# نمای پشت دستگاه Force EZ

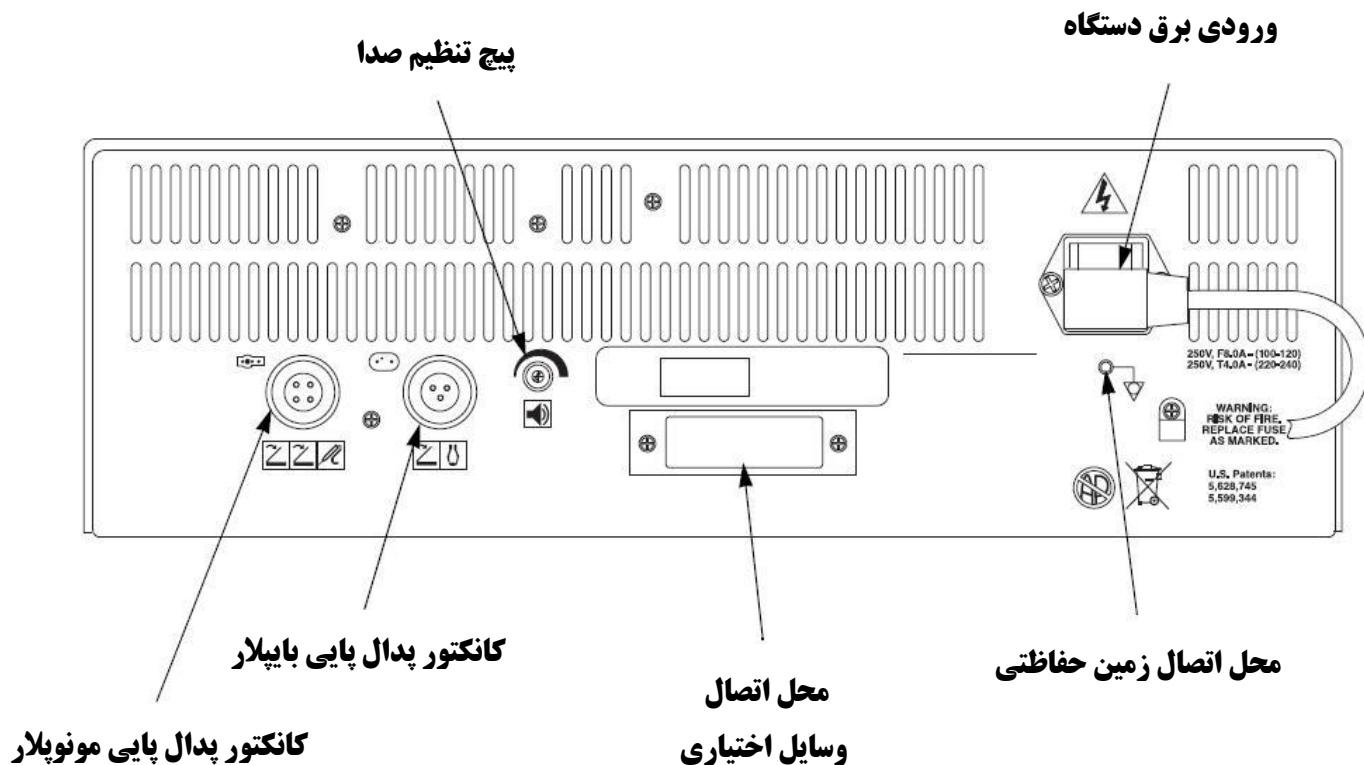

## مُد های Cut

**Pure** : در این حالت ، می توان عمل برش را با میزان انعقاد خیلی کم و یا بدون انعقاد انجام داد.  
**Blend** : این حالت برای انجام Cut همراه با انعقاد می باشد و در حقیقت تلفیقی از Cut و Coagulation است.

## مُد های Coag


**Low** : با انتخاب این حالت ، می توان منطقه ای از بافت که مستقیماً با نوک قلم در تماس است را Coagule کرد.  
**High** : در این حالت نوک قلم کوتر با فاصله نسبت به بافت نگهداشته میشود و برای Coag نمودن سطوح وسیع با عمق کم بکار میرد.

# نمای جلویی دستگاه Force EZ

شاخص هشدار REM (الکترو بازگشتی بیمار)  
این شاخص به رنگ قرمز روشن خواهد ماند تا وقتی  
که شما پیلت استاندارد را به درستی به بیمار وصل  
کرده و آنرا بوسیله سیم رابط به دستگاه متصل  
نمایید . پس از اتصال صحیح ، این شاخص به رنگ  
سبز روشن می شود

## شاخص پدال پای

وقتی شاخص سمت راست روشن می باشد پدال پای ، ابزار مونوپلار  
متصل به کانکتور ابزار جانبی را فعال می نماید و وقتی شاخص به سمت  
چپ روشن است ابزار متصل به کانکتور بایپلار را فعال می نماید.

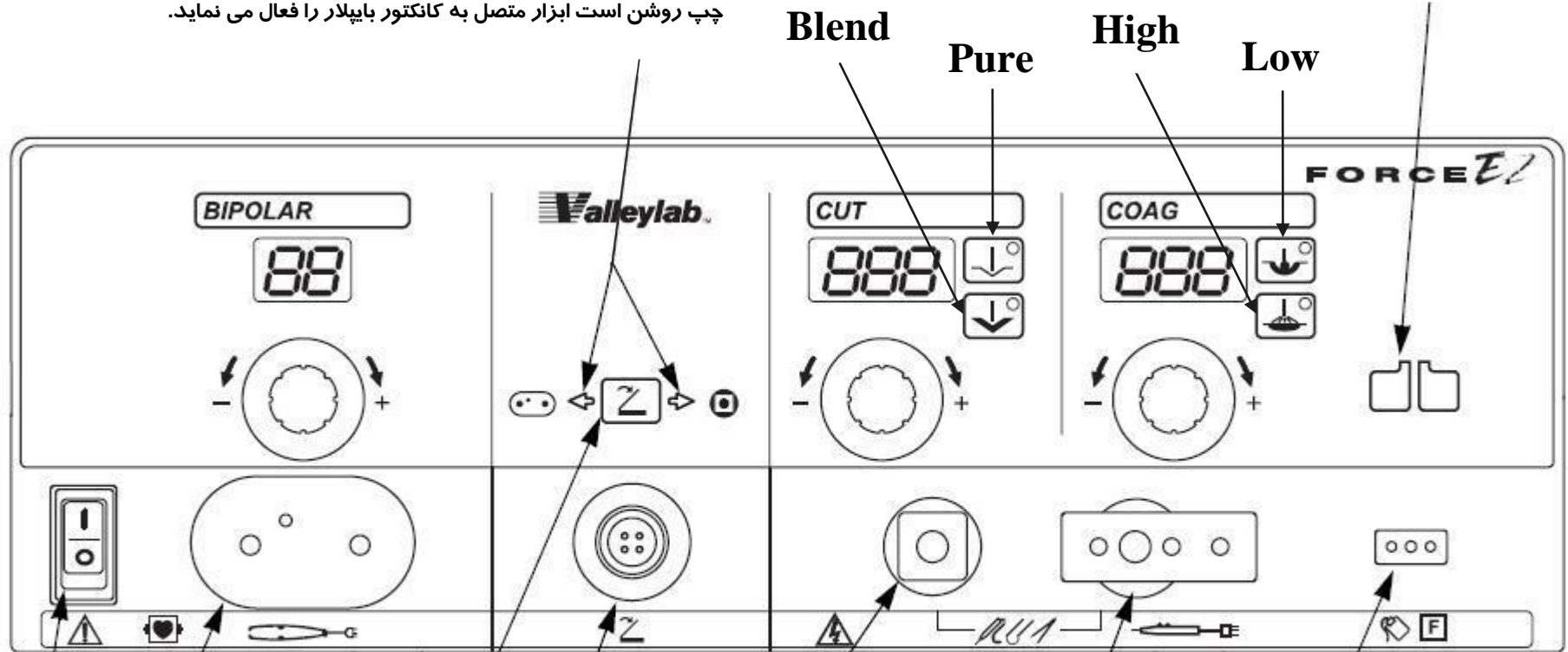

کانکتور ابزار بایپلار

کانکتور پدال پای

کانکتور وسایل جانبی

کانکتور سیم رابط پلنت

کلید خاموش / روشن

دکمه انتخاب حالت پدال پای

کانکتور ابزار مونوپلار