

راهنمای استفاده سریع Valleylab™ LS10, LS Series Single Channel Vessel Sealing Generator

پنل جلویی دستگاه



نمایش خطای سیستم

کلید روشن و خاموش

نمایش محدوده استفاده

نشاند هنده وضعیت هندپیس

پورت ورودی

نشاند هنده وضعیت سیستم

کلید Power



روشن کردن: فشار دهید و رها نمایید.

پورت ورودی



هندپیس را هنگامی که نشاند هنده وضعیت هندپیس سفید باشد، وارد نمایید.

نشاند هنده وضعیت هندپیس

قرمز: خطای هندپیس یا خرابی دکمه دستی هندپیس یا پدال پای. امکان نامعتبر یا آسیب دیده بودن یا ناسازگاری هندپیس وجود دارد. لطفاً از صحت عملکرد هندپیس اطمینان حاصل نمایید و مطمئن شوید هیچ کلید فعال کننده ای را فشار ندهد.

تطابق هندپیس: هندپیس های زیر با این دستگاه تطابق ندارند

	LS1200		LS2071		LS2111		LS3092		LF5544
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

نشاند هنده وضعیت سیستم



سفید: در حال حرکت- سیستم در حال انجام سلف تست می باشد

نایت- سیستم آماده استفاده می باشد، لطفاً هندپیس را وارد نمایید

چشمک زن- دستگاه در حالت سرویس می باشد. لطفاً برای استفاده دستگاه را خاموش و سپس روشن نمایید



بنفش: آماده برای انسداد عروق / انسداد عروق کامل شده است.



بنفش در حال حرکت: دستگاه در حال انسداد عروق می باشد.



نارنجی: آلارم کامل شدن پروسه انسداد. لطفاً مجدداً بررسی نموده، بافت را دوباره نگاه داشته و دستگاه را تا کامل شدن پروسه فعال نمایید.

نشاند هنده محدوده استفاده



در صورت نمایش، نشاند هنده استفاده مجدد از هندپیس متصل شده می باشد. استفاده مجدد مورد تأیید کمپانی سازنده نمی باشد.

نمایش هنده خطای سیستم



خطای سیستمی در دستگاه. لطفاً دستگاه را خاموش و مجدداً روشن نمایید. اگر خطا مجدداً اتفاق افتاد، با شرکت تهران جراح نوین تماس حاصل فرمایید.

پنل عقبی دستگاه



پیچ تنظیم صدا

دریچه تهویه هوا

کانکتور پدال پای

ECG blanking connector

شماره سریال دستگاه

محل اتصال کابل زمین

فیوز

سوکت برق شهر

پیچ تنظیم صدا

تنظیم حجم تن صدای شاخص. صدای آلارم خطاها و اخطارها نمی توانند تنظیم شوند.